



UPUTSTVO I INDIKACIJE

IMACO d.o.o. Antifasisticke borbe 34 Novi Beograd

Tel/fax: 011 311-21-80, 313-0361

e-mail: office@imacodoo.com site: www.imacodoo.com

MAGACIN MEDICINSKIH SREDSTAVA : Ratka Mitrovica 62 a Zarkovo

Tel/fax: 011 2381-061, 2381-062 e-mail: imacodoo@nadlanu.com

Red. broj	NAZIV MEDICINSKOG SREDSTVA	KATALOSKA SIFRA	JEDINI. MERE	DIMENZIJE ILI KOMPRESIJE	UPUSTVO ZA UPOTREBU	KARAKTERISTIKE I INDIKACIJE
CARAPE ZA VENE						
1.	Kompres.med..muske dokol. za vene relaksirajuće za muskarce koji dosta vremena provode sedeci ili stojeci. crna, teget, krem, braon, bordo i bela II III IV V 18-21 21-25 25-29 29-33	S-450	par	mmHg 17-20	<i>Potrebnu kompresiju za korisnika određuje lekar specijalista. Za uzimanje mera za određivanje velicina koristite tabelu na pakovanju i u prilogu</i>	U terapiji kod pocetnih simptoma hronicne venske insufijencije donjih ekstremiteta, smanjuje otok i umor nogu, poboljsava cirkulaciju. Clasa I Registrovane u ALiMS Velicine : prema obimu skocnog zglobo ili cipele (tabela na pakovanju)
2.	Kompres .carape za vene 70 den hulahop, providne, mrezaste i elast. boje: crna, siva, boja koze, braon II III IV V 81/2-9 9-91/2 91/2-10 > 10 36-37 37-38 38-40 > 40	S-470	Kom	mmHg 15-18	Vazi za sve carape <i>Zbog jace kompresije stariji pacijenti-korisnici teže obuvaju carape. Carape se obuvaju u jutarnjim casovima dok su noge odmorne preporucuje se navlacenje carapa u polulezecem položaju.</i>	Elasticna relaksirajuća linija sa srednjom kompresijom za zene sa blagim venoznim problemima, poboljsava cirkulaciju, smanjuje otok i umor nogu. Profilaksa venskih obolenja u rizičnih pacijenata. Clasa I Registrovane u ALiMS Velicine prema visini i tezini iz tabele
2a.	Kompr.hul.za vene za trudnice 70den	S-476	kom	mmHg 15-18		
3.	Kompre.med.carape za vene 140 den hulahop , providne, elasticne , mrezasto tkane. boje: crna, boja koze, braon, siva od II do VI	S-490	kom	mmHg 19-22	<i>Pokupiti carapu do dela stopala obema rukama navuci na prste nogu i lagano navlasciti do pete. Nakon toga razvuci carapu do predela kolena ili butine</i>	Elasticna, mrezasta, za zene sa hronicnim venoznim problemima, srednja jaca kompresija, sa ojacanim gacicama i petom, poboljsava cirkulaciju , uklanja otok i umor nogu. Preporucuje se u slučajevima tromboflebitisa i posoperativnu negu. Clasa I Registrovane u ALiMS Velicine prema visini i tezini iz tabele
4.	Kompres.dokolenice za vene 140 den providne, elasticne, mrezasto tkane boje: crna, boja koze, siva, braon od II do V Velicine prema visini i tezini iz tabele	S-498	par	mmHg 19-22	<i>Medicinske kompresivne carape klase II u pakovanju imaju pomocnu carapicu za lakse obuvanje carapa. Navuci carapicu na vrh prstiju i preko njih ponoviti gore opisani postupak obuvanja.</i>	U terapiji pocetnih simptoma hronicne venske insufijencije donjih ekstremiteta kod zena, srednja jaca kompresija, poboljsava cirkulaciju u nogama i smanjuje otok. Clasa I ALiMS
5.	Komp. medic.antitromb carape do prepona boja: bela II III IV 18-23 23-28 28-33 zuta linija zelena linija crvena linija utkana oko prstiju na carapi	S-427	par	mmHg 18-24	<i>Kada se obuje carapa na jednu nogu na otvoru u predelu prstiju izvuci pomocnu carapicu i ponoviti postupak na drugoj nozi.</i>	Antitrombozna carapa sa postepenom kompresijom, poboljsava cirkulaciju, masazu, preporucuje se kod osoba sa hronicnim venoznim problemima, za posoperativni oporavak kod lezecih bolesnika. Clasa I Registrovane u ALiMS Prema obimu skocnog zglobo



6.	Kompre.med.carape za vene 180 den hulahopke, mrezasto tkane, providne boje: crna i boja koze II - VI	S-835	kom	mmHg 23-26	<i>Vreme nosenja carapa određuje lekar. Nose se na bosoj nozi po preporuci lekara. U slučaju povreda na kozi savetuje se higijeska zastita povreda gazom, zavojem ili flasterom</i>	U terapiji hronicne venske isufijencije donjih ekstermiteta kod zena, nakon hiruskih intervencija na venama i prevenciji tromboze dubokih vena. Clasa I Registravane u ALiMS	
7.	Komp.carape za vene 180 den silicon samodrzeca nadkolena carapa sa silikonskim zavrsetkom koji zenu cine atraktivnom i elegantnom. boje: crna i boja koze II - V	S-836	par	mmHg 23-26	<i>Ukoliko nastupi iritacija ili bol preporucuje se prestanak upotrebe i konsultacije sa lekarom. Carape se nose samo dok je pacijent aktivan, kada se odmara treba ih skinuti. Osim carapa II clase koje se koriste u lecenju venskih cireva.</i>	Jaka kompresija, postepeni pritisak od skocnog zglobo 100% list 70% nadkoljenica 50% poboljsava cirkulaciju , leci vensku insuficijenciju, specava aktiviranje koagulacije i trombozu vena, posoperativni opopravak. Clasa I Registravane u ALiM	
8. 8a 8b	Komp.medic.hulahop.za vene K1 Kompresivne dokolenice K1 Kompresivne nogavice K1 jako i gusto tkanje, neprovidne, otvoreni prsti boja: boja koze-crna II III IV V VI 17-21 21-25 25-29 29-33 33-37 Prema obimu skocnog zglobo	S-442 S-440 S-441	kom par par	mmHg 20-30	<i>Prati blagim sredstvima rucno, ne susiti na grejnim telima, ne scediti ne koristiti centrifuge ne peglati. Kompresija- stepenast pritisak odozdo ka gore (100% u predelu skocnog zglobo, list 70% 40% nadkoljenica ili butina.</i>	Medicinske terapeutiske efikasne za slučaj tromboflebitisa, posoperativnog oporavka,kod intervencija na prosirenim venama, skleroterapije, povreda i frakturna. Poboljsava dubinsku i površinsku cirkulaciju i otklanja zastoje u cirkulaciji. Preporucuje se kod osoba sa hronicnim venoznim problemima, kod upale edema, cireva. Clasa I	
9.	Komp. med.dokolen. za vene K1 do kolena jako i gusto tkanje, otvoreni prsti boja: boja koze II III IV V 18-21 21-25 25-29 29-33 Prema obimu skocnog zglobo	S-480	par	mmHg 25-30	<i>Kompresija- stepenast pritisak odozdo ka gore (100% u predelu skocnog zglobo, list 70% 40% nadkoljenica ili butina. Postepena kompresija omogucava pravilan protok krvi, sprecava aktiviranje koagulacije i trombozu vena.</i>	Indikacije kao kod predhodne K1. Koriste se po preporuci lekara.	
10.	Komp.med. carape do prepona K1 Nogavice natkolene, jako i gusto tkanje, otvoreni prsti boja: boja koze II III IV V 18-21 21-25 25-29 29-33 Prema obimu skocnog zglobo	S-402	par	mmHg 25-30	<i>Paznja: Pre oblaćenja carapa sa graduiranom kompresijom treba skinuti sa prstiju prestenje i druge ukrase da ne bi ostetili carape ostrim ivicama nakita.</i>	Indikacije kao kod predhonih K1 i sledećih Carape treba obuvati u lezecem položaju pre ustajanja iz kreveta sa podignutom nogom u vis i pomocu svilene papuice koja se nalazi u kutiji uz carape. Klasa I ALiMS	

11.	<p>Komp.med.carape do prep. silicon K1</p> <p>Natkolene nogavice sa silikonskim zavrsetkom, jako i gusto tkanje, otvoreni prsti boja: boja koze</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td></tr> <tr> <td>18-21</td><td>21-25</td><td>25-29</td><td>29-33</td></tr> </table> <p>Prema obimu skocnog zgloba</p>	II	III	IV	V	18-21	21-25	25-29	29-33	S-403	par	mmHg 25-30		<p>Indikacije kao predhodne K1</p> <ul style="list-style-type: none"> -funkcionalne smetnje (tezina,zamor -blagi varikoziteti sa subjek.manifest. -manji variksi -kutane vene -retikularni variksi -hronicna venska insuficijencija <p>I stepen</p> <ul style="list-style-type: none"> -profilaksa tromboembolizma -trombophlebitis superfitalis <p>sa edemom</p> <p>Klasa I Registrovano u ALiMS</p>	
II	III	IV	V												
18-21	21-25	25-29	29-33												
12.	<p>Komp.med.dokolenice K2</p> <p>Veoma jako i gusto tkanje, otvoreni prsti, postepena kompresija od zgloba ka preponama.</p>	S-484/485	par	mmHg 34-40		<p>Klasa 2 dokolenice, nadkolenice, hulahopke i carape sa pojasmom za osobe sa hronicnim venoznim problemima, kod upale edema, cireva. Veoma efikasne za slučaj tromboflebitisa, posoperativnog oporavka kod intervencija na prosirenim venama, skleroterapije, povreda i frakturna.</p>									
12a	<p>Komp.medic.carape do prepona K2</p>	S-495	par	mmHg 34-40											
12b	<p>Komp.med. hulahopke K2</p>	S-492	kom	mmHg 34-40											
12c	<p>Komp.med.nogavice sa pojasmom K2 leva ili desna</p> <p>boja: boja koze</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>18-23</td> <td>23-28</td> <td>28-33</td> </tr> </table> <p>Prema obimu skocnog zgloba</p>	II	III	IV	18-23	23-28	28-33	S-425/435	kom	mmHg 34-40		<ul style="list-style-type: none"> -primarni varikoziteti sa edemima -II stepen (hronicni edem, eczema,erythema,hipodermitis,dermatosklerosis, dermite ocre, atrofije blanche) -III stepen (izlecen ulucus cruris) -tromboflebitis zavisni (profunda-vein tromb) u dvomesecnoj bazicnoj Th -posttrombotski edem -posle skleroterapije ili hirurgije vena <p>Održavanje uspesne terapije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posle scleroterapije - posle strippinga - posle ambulantne hirurgije <p>Lipedem i reverzibilni lipedem nakon terapije</p> <p>BROJ CARAPA MORA BITI PRECIZNO ODREĐEN</p>	 		
II	III	IV													
18-23	23-28	28-33													

PROIZVODI SE NOSE NA ZDRAVOJ KOZI, U SLUČAJU PRISUTNIH POVREDA SAVETUJE SE NJIHOVA HIGIJENSKA ZASTITA STERILNOM GAZOM ILI FLASTEROM UKOLIKO NASTUPE IRITACIJE ILI BOL
PREPORUČUJE SE PRESTANAK UPOTREBE I KONSULTACIJE SA LEKAROM. KOMPRESIJE I VREME NOSENJA ODREDUJE LEKAR. GORE NAVEDENI PROIZVODI REGISTROVANI SU U ALIMS KLASA I

13	Elasticni zavoj sir.10cm	S-656	kom		<i>Koriscenje po preporuci lekara. Univerzalna velicina</i>	Preventivne i terapeutske svrhe, prilikom naprezanja, istezanja distorzije, lokalnih bolova, oticanja	
14.	Elasticni zavoj –traka plava sa cickom od 30 do 100 cm	S-600	kom		<i>Koriscenje po preporuci lekara Zavisno od potrebe ukrstanjem i cickom formira se ortoza-steznjak za zglobove.</i>	Potpore zglobova i ligamenata ruke i noge Klasa I Registrovano u ALiMS	
	RAME, LAKAT, SAKA						
15.	Ortoza za rame Velicine: leva-desna S M L 80-100 100-120 120-140	HEMISAFE	kom		<i>Prvo se podešava rukav sa cicak trakom. Kais koji ide od predela bolnog ramena ka suprotnoj strani tela prostire se ispod pazuha iznad grudi. Nakon podešavanja pritiska ispod ruke postaviti korektivno jastuce koje se lepi cickom.</i>	Kod posttraumatskih i postoperativnih bolova i degenerativnih promena ramena, prevencija ili lecenje bola kod hemiplegije ramena Dizajnirana da omoguci centriranje glenohumeralnog zgloba Klasa I	
16.	Ortoza za rame-grejna rastegljiva od mekane vune I II III IV V VI	S-619	kom	I-VI	<i>Jednostavno navucite prvo jednu stranu kratkog rukava na jednu ruku prebacite drugi deo preko ramena i navucite drugi rukav</i>	U preventivne i terapeutske svrhe, prilikom naprezanja, istezanja distorzije, lokalnih bolova, oticanja , blagotvornim efektom zagrevanja u vratnoj i dorsalnoj regiji Klasa I Registrovana u ALiMS	
17.	Fiksator ramena i ruke podesavajuca za levu ili desnu ruku	S-629	kom	univerzalan	<i>Kais za regulaciju visine provuci kroz sundjerastu potporu koju smestiti na ledjni vratni deo. Provucite obolelu ruku kroz otvor za podrsku i regulisite visinu sa kopcom.</i>	Potpore za rame i ruku uz preporuku lekara moze se koristiti kod misicnih povreda, fraktura ili povreda zglobova ramena i lakta, za rehabilitaciju ili hiruske intervencije . Imobilise ruku u laktu i ramenima , umanjuje bol i otekline. Klasa I	
18.	Fiksator za ruku MITELA boja: crna I II III IV XS S M L	S-625	kom	L-XL	<i>Podesite kais, prebacite ga preko ramena sa predhodnim navlacenjem sundjerastog dela koji se pozicinira na gornjem vratnom delu . Provucite povredjenu ruku tako da se ruka oslanja na donji deo mitele.</i>	Koristi se u slucaju preloma ruke i kada je potrebna fiksacija ruke u odredjenom polozenju. Klasa I Registrovano u ALiMS	

19.	<p>Ortoza za rame, lakt i rucni zglob</p> <p>Univerzalna: za levu i desnu ruku</p>	ABIDI 15% ABIDI 30/45%	kom		<p><i>Uske cicak trake omotati oko ruke, jednu u predelu rucnog zgloba a drugu iznad laka. Siroku cicak traku omotati oko struka, postaviti korekivni jastuk i fiksirati ga sirokim pojasmom. Podesiti kais na predelu ramena koji mora u donjem delu pridrzavati korektivni jastuk</i></p>	<p>Koristi se postoperativno nakon preloma i kod upalnih procesa u ramenom zglobu</p> <p>Klasa I Registrovano u ALIMS</p>	 												
20.	<p>Torokalni pojas ukrstajuci anatomski elastican korektor ramena od elasticnog pamuka.</p> <table border="0" data-bbox="185 491 572 540"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td> </tr> <tr> <td>42-44</td><td>44-46</td><td>46-48</td><td>48-50</td><td>50-52</td><td>52-54</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	V	VI	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54	S-621	kom	I-VI	<p>Vazi za sve torokalne <i>Provuci pojedinačno ruke kroz manji otvor tako da tanji deo bude smesten ispod pazuha. Prihvati u lednjom delu po jedan duzi deo kaiseva ukrstiti u predelu ledja i sastaviti oba kraja u predelu ispod grudi</i></p>	<p>Prevencija kifoze, balansira istezanje gornjeg ledjnog pojasa, obezbeđuje pravilan položaj i zastitu ramena od povijanja napred. Tretman u rehabilitaciji krive kicme i ledja. Klasa I</p>	
I	II	III	IV	V	VI														
42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54														
21.	<p>Torokalni pojas sa udlagama ojacan elasticnim trakama i 2 polukruta podupiraca u lednjom delu</p> <table border="0" data-bbox="185 780 544 812"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	V	VI	S-624	kom	I-VI	<p>Prebacite pojas preko ledja tako da ga pridrzavate za dva duga kaisa koja podvucete ispod pazuha ukrstite na lednjom delu i pricvrstite na predelu ispod grudi</p>	<p>Kod kifoze, pomaze kod torokalnih bolnih stanja, obezbeđuje pravilan položaj i zastitu ramena od povijanja napred. Klasa I Registrovan u ALIMS</p>							
I	II	III	IV	V	VI														
22.	<p>Ortoza sake i palca za levu i desnu ruku univerzalna</p>	S-841	kom	univerzalna	<p>Spojite kaiseve cicak trakom oko zgloba ruke i oko palca</p>	<p>Ortoza za zglob ruke i palac. Ogranicava misicne kontrakcije, smanjuje otok i bol uz parcijalnu imobilizaciju i ogranicavanje pokreta. -distorzija palca, fracture falangi palca</p>													
23.	<p>Ortoza sake leva/desna Izradjena od jakog pamucnog materijala sa koznim obrubom podesavajućim trakama na cicak sa metalnom udlagom</p> <table border="0" data-bbox="185 1302 544 1367"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td> </tr> <tr> <td>14-16</td><td>16-18</td><td>18-20</td><td>20-22</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	14-16	16-18	18-20	20-22	S-840	kom	I-IV	<p>Podesite metalni deo ortoze u zavisnosti da li se koristi za levu ili desnu ruku. <i>Postavite dlan na metalni deo tako da izdignuti deo bude u predelu dlana i spojite cicak trakom</i></p>	<p>Steznik za ruku i rucni zglob, za slučaj istezanja i usinjuca. Efikasan kod rehabilitacije posle hiruskih intervencija. Klasa I Registrovano u ALIMS</p>					
I	II	III	IV																
14-16	16-18	18-20	20-22																

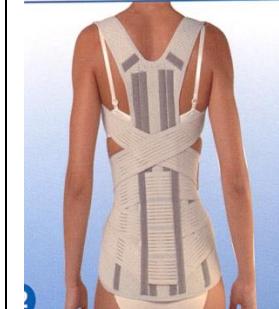
24.	Ortoza sake mano prima Elasticna kompresivna ortoza sa metalnim ojacanjem –udlagom sa gornje i donje strane ruke univerzalna	S-842	kom	univerzalna	<i>Postavite ruku dlanom na metalnu polugu do pocetka zavrsetka prstiju. Zategnite cicak trakama</i>	Imobilizacija sake i prstiju kod trauma, upala nerava dislokacije prstiju sake, kod postoperativnog oporavka. -tendinitis, stabilizacija ligamenata, rheumatic illnesses, arthritis, arthrosis Klasa I Registrovano u ALiMS									
25.	Ortoza sake, palca i podlaktice L/D anatomska, obostrano ojicana aluminijskim sinama, sa cicak trakama za fiksaciju <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr><tr><td>14-16</td><td>16-18</td><td>18-20</td><td>20-22</td></tr></table>	I	II	III	IV	14-16	16-18	18-20	20-22	S-847/848	kom	I-IV	<i>Postavite ruku dlanom na metalnu polugu do pocetka zavrsetka dlanu. Zategnite cicak trakama</i>	Za jaku imobilizaciju sake i palca u ortopediji, za rehabilitaciju, fracture distorzije, artrozis, reumatoидni arthritis. Klasa I Registrovano u ALiMS	
I	II	III	IV												
14-16	16-18	18-20	20-22												
26.	Ortoza za rucni zglob funkcionalna Velicine: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>S</td><td>M</td><td>L</td></tr><tr><td>14-16</td><td>16-18</td><td>18-20</td></tr></table>	S	M	L	14-16	16-18	18-20	M4.2	kom		<i>Provucite palac kroz deo za podrsku palca zategnite kaiseve-cicak trakom na rucnom zglobu, ne vrseci veliki pritisak na ruku</i>	Kod inflamatornih i postraumatskih procesa u karpalnoj regiji Klasa I Registrovano u ALIMS			
S	M	L													
14-16	16-18	18-20													
27.	Ortoza za rucni zglob funkcionalna Velicine: S M L 14-16 16-18 18-20	M5.2	kom		<i>Provucite palac kroz deo za podrsku palca zategnite kaiseve-cicak trakom na rucnom zglobu i podlaktici, ne vrseci veliki pritisak na ruku</i>	Kod inflamatornih i postraumatskih procesa u karpalnoj regiji Klasa I Registrovano u ALIMS									
28.	Ortoza za prst splint Velicine: S M L cm : 5.7 7 7.6	RANA	kom		<i>Ortoza od oblikovanog aluminijuma oblozena iznutra penastim mekanim materijalom. Namesta se pritiskanjem aluminijumskih delova oko prsta</i>	U imobilizaciji prsta, kod frakturne distalne falange Klasa I Registrovano u ALMS									
29.	Ortoza za rucni zglob funkcionalna leva ili desna <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>S</td><td>M</td><td>L</td></tr><tr><td>7-8</td><td>8-9</td><td>9-10</td></tr></table>	S	M	L	7-8	8-9	9-10	2.1 2.2	kom kom		<i>Postaviti ruku dlanom na plasticnu podlogu tako da palaci bude smesten u za to odredjen prostor. Zategnite kaiseve cicak trakom tako da ne vrsite veliki pritisak na ruku</i>	Kod inflamatornih i posttraumatskih procesa u karpalnoj regiji. Prevencija i tretman reumatskih promena			
S	M	L													
7-8	8-9	9-10													

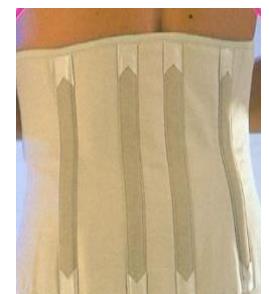
30.	Ortoza za rucni zglob funkcionalna leva ili desna S M L XL 13-15 15-17 17-19 19-21	8707	kom	<p><i>Postaviti ruku dlanom na plasticnu podlogu tako da palace bude smesten u za to određen prostor. Zategnite kaiseve trakoma tako da ne vrsite veliki pritisak na ruku</i></p>	Kod inflamatornih i posttraumatskih procesa u karpalnoj regiji. Prevencija i tretman reumatskih promena	
ORTOZE TLSO, LSO						

31.	Ortoza za kicmu hiperekstenziona Velicine: S L 76-94 94-114 Visina: 43-50 48- 59	C 38	kom	<p><i>Cvrsta ortoza sa podesavanjem sa strane uz pomoc odgovarajucih zatvaraca-klapni. Lekar specijalista je jedina osoba koja moze odredite duzunu nosenja ortoze. Podesava se u pet velicina za sirinu grudi i kukova.</i></p>	Obezbedjuje pravilan položaj kicmenih prsljenova, pre i post-operativnu stabilizaciju. Koristi se kod frakturna kicmenih prsljenova, discushernije, osteoporoze, spondiloze i malignih procesa na kicmi. Smanjuje rizik od daljih povreda, obezbedjuje stabilizaciju donje torokalne i lumbalne kicme.	
-----	--	------	-----	--	--	---

32.	Ortoza torokalna Velicine: Univerzalna podesiva	9400P	kom	<p><i>Provucite ruke kroz oba kaisa pozicinirajuci ih na ramenom delu. Zlepite siroku cicak traku na visini ispod rebara a onda zategnite obe ramene trake do odgovarajućeg pritiska. Za korekciju ramenog pritiska koristite kopce koje se po postavljanju pojasa nalaze u lednjnom delu.</i></p>	U prevenciji kifoze u rehabilitaciji krive kicme i ledja, kod svih stadijuma osteoporoze. Klasa I Registrovana u ALIMS	
-----	---	-------	-----	--	--	--

33.	<p>Ortoza za kicmu korektivna</p> <p>Dostupni modeli za zene i muskarce Velicine: prema obimu grudnog kosa, struka i kukova S M L XL</p>	TLSO	kom	<p><i>Modelira se prema pacijetu. Prvo se namesta ledjni deo koji se postavlja na odgovarajuću visinu a zatim prednji deo na istoj visini. Kaisevima na ledjima provucite kroz kopce koje se nalaze sa obe strane i fiksirajte ih. Na sredini prednje strane ortoze zasrafiti metalni deo, tako da njegovi kraci budu u visini kvalikularne kosti pa onda trake sa ledja provuci i fiksirati na krajevima ovog dela</i></p> <p>Koristi se kao immobilizator dorzalne ili lumbalne zone, pre ili post-operativno za lecenje kifoskolioze kod dece. Obezbedjuje adekvatnu kompresiju i potporu kako torako-lumbalno-sakralne tako i klavikularne regije, pravilan položaj tela i kontrolu pokreta koji izazivaju bol.</p> <p>Klasa I Registrirano u ALIMS</p>																			
34.	<p>TLSO mider – dinamicki</p> <p>Izradjen od elasticne microfiber samoprijanjuće tkanine, 4 celicne letvice polukrute samoprilagodljive, zatvaranje cicak trakama, dve horizontalne trake spreda, elasticni ukrsteni pojasevi.</p> <table border="1"> <tr> <th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>XXL</th><th>XXXL</th></tr> <tr> <td>62</td><td>82</td><td>92</td><td>102</td><td>112</td><td>120</td></tr> <tr> <td>81</td><td>91</td><td>101</td><td>111</td><td>121</td><td>131</td></tr> </table>	S	M	L	XL	XXL	XXXL	62	82	92	102	112	120	81	91	101	111	121	131	TLM 647	Kom	<p>Pomagalo se postavlja preko potkosulje. Pomagalo se nosi po preporuci lekara u vezi sa vremenom i nacinom koriscenja. <i>Omotajte mider oko struka. Obuhvatite obema rukama donje delove midera i spojite cicak trakom. Isto uradite sa gornjim delovima da predela pupka. Gornje uze pojaseve spojite sa ostalim delovima u prednjem delu. Dve uske cicak trak zlepite u predelu plecnog dela ukrstite tako da vam oba kraja prodju ispod pazuha i zlepite cicak traku u prednjem delu pojasa.</i></p> <p>Koristi se posle operacije intervertebralnog diskusa -dorzalno obolenje -patologije dorzo-lumbalne regije -artoza dorzo-lumbalna -disfunkcija kicme usled osteoporoze -hiperkifoza i/ili pojascani bolovi lumbalne regije -post-operativna pomoc -spondiloza</p>	 
S	M	L	XL	XXL	XXXL																		
62	82	92	102	112	120																		
81	91	101	111	121	131																		

35.	<p>Ortoza za kicmu stabilizaciona</p> <p>Velicine:</p> <table border="0"> <tr> <td>S</td><td>M</td><td>L</td></tr> <tr> <td>85-95</td><td>95-105</td><td>105-115</td></tr> <tr> <td>XL</td><td>XXL</td><td></td></tr> <tr> <td>115-125</td><td>125-135</td><td></td></tr> </table>	S	M	L	85-95	95-105	105-115	XL	XXL		115-125	125-135		238	kom		<p><i>Od elasticnog pamuka vazdusno propustiva i 4 polukruta ili kruta paravertebralna podupiraca i unakrsnim elasticnim trakama.</i></p> <p><i>Postaviti kaiseve sa lednjog dela preko ramena i provucite ih ispod pazuha, povucite ih prema nazad ukrstite na ledjima prebacite ka bokovima i fiksirajte na odgovarajucim pozicijama</i></p>	<p>Kod obolenja lumbalno-ledjne regije, lumbago, isijasa, klizanja prsljenova kao i post-operativna potpora nakon operacije intervertebralnog diskusa.</p> <p>Klasa I</p> <p>Registrirano u ALIMS</p>					
S	M	L																					
85-95	95-105	105-115																					
XL	XXL																						
115-125	125-135																						
36.	<p>LSO stab.ortoza za kicmu 27cm</p> <p>od elasticnog pamuka, sa 4 polukruta paravertebralna podupiraca i unakrsnim elasticnim trakama</p> <table border="0"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr> <tr> <td>60-80,70-92,90-104,100-116</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>V</td><td>VI</td><td>VI</td><td>VIII</td></tr> <tr> <td>110-128, 120-140, 130-152, 140-165</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	I	II	III	IV	60-80,70-92,90-104,100-116				V	VI	VI	VIII	110-128, 120-140, 130-152, 140-165				S-610	kom	I-VIII	<p>Vazi za sve LSO</p> <p><i>Proizvod se nosi preko majice ili potkosulje po preporuci lekara.</i></p> <p><i>Stavite pojaz oko struka prednji deo obuhvatite obema rukama i povucite ka napred da</i></p>	<p>Potpore lumbalne i abdominalne regije, preporucuje se od strane hirurga ili fizijatra kao postoperativna ili posthiruska potpora, kod obolenja lumbalne ledjne regije, lumbago, dorso-lumbalna obolenja, isijas, klizanje prsljenova. Klasa I</p>	
I	II	III	IV																				
60-80,70-92,90-104,100-116																							
V	VI	VI	VIII																				
110-128, 120-140, 130-152, 140-165																							
37.	<p>LSO stab.ortoza za kicmu 27cm</p> <p>duplo zatezanje-crni</p> <table border="0"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td></tr> <tr> <td>75-85</td><td>80-100</td><td>95-115</td><td>100-125</td></tr> </table>	I	II	III	IV	75-85	80-100	95-115	100-125	S-661	kom	I-IV	<p><i>bi cicak trakom ili kopcama u prednjem delu sastavili pojaz.</i></p> <p><i>Podesite zatezanje postepenim odlepljivanjem ili popustanjem kopci na potreban pritisak</i></p>	<p>Jaka potpora lumbalne regije pogodna i za sportiste -lumbalgija, lakse L-S traume</p> <p>Velicine po obimu struka</p> <p>Klasa I Registrirano u ALIMS</p>									
I	II	III	IV																				
75-85	80-100	95-115	100-125																				
38.	<p>LSO stab.ortoza za kicmu 27cm</p> <p>duplo zatezanje</p> <table border="0"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td><td>VI</td></tr> <tr> <td>60-80</td><td>70-92</td><td>90-104</td><td>100-116</td><td>110-128</td><td>120-140</td></tr> </table>	I	II	III	IV	V	VI	60-80	70-92	90-104	100-116	110-128	120-140	S-607	kom	I-VI	<p><i>Za LSO sa vise kaiseva za zatezanje postupno zatezite i lepite po dva kaisa. Ukoliko nastupi bol preporucuje se prestanak upotrebe i konsultacije sa lekarom</i></p>	<p>Kod obolenja lumbalno ledjne regije, lumbago, dorso-lumbalna obolenja, isijas, klizanje prsljenova</p> <p>Klasa I Registrirano u ALIMS</p>					
I	II	III	IV	V	VI																		
60-80	70-92	90-104	100-116	110-128	120-140																		

39.	LSO stab.ort.za kicmu 30 cm prati liniju struka i kukova, 4 kruta paravertebralna podupiraca. I II III IV V VI VII VIII 73-83, 78-89, 83-95, 88-10, 93-10, 98-113, 103-119, 108-125	S-611	kom	I-VIII	Odrzavanje: prati u mlakoj vodi, cetkicom ili pokretima ruke, ne cediti, ne susiti na grejnim telima i ne peglati.	Lumbago, lumboishialgije, lakse lumbalne traume, klizanje prsljenova. Klasa I Registrovan u ALiMS	
40.	LSO stab.ort.za kicmu 35 cm Visoki mider prati liniju struka i kuka sa 4 kruta paravertebralna podupiraca I II III IV V VI VII VIII IX X isto kao S-611 IX- 113-130 X- 118-135	S-605	kom	II-X	Za vreme pranja delove za cicak trakom prati sa zapepljenom cicak trakom . Velicine po obimu kuka iz tabele	Lumbago, lumboishialgija, lakse lumbalne traume, klizanje prsljenova. Klasa I Registrovan u ALiMS	
41.	Ortoza za kicmu stabilizaciona <i>Velicine</i> S M L XL XXL 85-95 95-105 105-115 115-125 125-135	235	kom			Kod diskus hernije, lumbago i kao postoperativna potpora. Klasa I Registrovano u ALIMS	
	TRBUSNI POJAS						
42.	Trbusni pojaz sa otvorom za stomu -elastican , sirine 25 cm	UGO 75	kom	70-110	Ugo pojaz postavite tako da otvor za disk bude sa prednje strane. U predelu otvora za disk zakacite vasu kesu. Cikom sa obe strane pojaza regulisite zategnutost da vam bude funkcionalno i udobno	Ugo elasticni posoperativni pojaz sa otvorom za stomu koristi se kod pacijenata koji su imali hiruske intervencije. Pojas daje potporu za stomak i neometano koriscenje stoma kompleta. Za postoperativni oporavak i opustene stomacne misice.	

43.	Pojas posoperativni abdom. pamuk tubularni-rastegljiv I II III IV V VI 55-75,65-85,75-95,85-110,95-125,140	S-108	kom	I-VI	VAZI ZA 108 I 109 <i>Pojas je tubularni navlaci se iz pravca nogu ili glave i povlaci do abdominalne regije Velicine po obimu kuka iz tabele</i>	Potpore abdominalne i karlicne regije, za jakanje trbusnih misica i materice i kao potpora kod blaze hernije. Klasa I ALiMS	
44.	Pojas posop.abdom. vuna I II III IV V VI 55-75,65-85,75-95,85-110,95-125,140	S-109	kom	I-VI	<i>Pere se u malkoj vodi , ne cediti ne susiti na grejnim telima ne peglati</i>	Potpore abdominalne karlicne regije i kao grejni pojasa-isijakus Klasa I Registrovan u ALiMS	
45.	Pojas abdom.posoper. cicak 24cm elasticni,podesavajuci pojasa sa cicak trakom sirine 24 cm I II III IV V VI	S-124	kom	I-VI	POJAS SA CICAK TRAKOM <i>Stavite pojasa oko struka i zlepite krajeve cicak trakom. Zategnite pojasa postepenim odlepiljivanjem cicak trake i zatezanjem od donjeg dela ka gore</i>	Koristi se u preventivne i terapeutske svrhe i kao post-operativna potpora. Klasa I Registrovan u ALiMS	
46.	Pojas abdom.posoper. cicak 27 cm Sirina 27 cm, podesavajuci cicak trakom. I II III IV V VI	S-197	kom	I-VI	<i>Odrzavanje: Prati u mlakov vodi, neutralnim ili blagim sredstvom za pranje. Delove sa cicak trakom prati sa zlepjenim cickom. Ne susiti na grejnim telima ne peglati</i>	Nakon hirurških intervencija abdominalne regije i grudnog kosa, za jakanje trbusnih misica i materice , kao potpora kod hernije. Klasa I	
47.	Pojas za trudnice sa cipkom II III IV V VI VII Pojas za trudnice	S-900	kom	II-VII	<i>Navuci pojasa tko da siroki elasticni deo podupire donji deo stomaka. Pamucni deo navuci preko stomaka do pupka.</i>	Prenatalni pojasa sa abdominalnim pojacanjem, nosi se od 6 ili 7 meseci trudnoce.	

	SUSPENZORIJUM I POJAS ZA KILU						
48.	Suspenzorijum size: I II III IV V VI VII VIII 60 70 80 90 100 110 120 130	S-617	kom	I-VIII	<i>Velicine po obimu kuka Navlaci se kao donji ves sa pozicijama na kukovima Nosi se na zdravoj kozi</i>	Pogodni u slucajevima variococele, hydrocele, epididimisa,i u postoperativnom period Klasa I	
49.	Utega za ingv.kilu leva/desna sa gumenim uloskom pokrivenim mekanom kozom	S-680/681	Kom	II-VI	<i>Gumeno jastuce postaviti u predelu prepona na mestu gde se nalazi kila. Duze delove pojasa sastaviti i pricvrstiti kopcom. Podesiti potreban obim kraci deo pojaseva u predelu kile provuci</i>	Inginalni pojas za kilu leva ili desna obostrana ingvinalna herniju	
50.	Utega za ingvinalnu kilu obostrana II III IV V VI 75-80 80-86 86-92 92-99 99-106	S-682	kom	II-VI	<i>Gumeno jastuce postaviti u predelu prepona na mestu gde se nalazi kila. Duze delove pojasa sastaviti i pricvrstiti kopcom. Podesiti potreban obim kraci deo pojaseva u predelu kile provuci</i>	Klasa I Registrovani u ALiMS	
51.	Slip utega-gace za ing.kilu hiruska utega-gace sa otvorom i genitalnim gumenim uloskom	S-646	Kom	II-VIII	<i>izmedju nogu od pravca kile ka lednjom delu i zakaciti na alkicu smestenu na sitem delu pojasa oko struka. Zategniti deo na kome se nalazi gumeno jastuce da izvri pritisak na kilu. Odrzavanje kao i za ostala sredstva</i>	Obezbedjuje neophodno podupiranje i zastitu abdominalne regije, podrucja bubrega i karlice zbog cega se preporucuje kao post-operativna potpora. Kod ingvinalne hernije preporucuje se model sa genitalnim gumenim uloscima. Koristi se i u preventivne svrhe kod osoba izlozenim stalnim fizickim naporima tokom sportskih i radnih aktivnosti. Klasa I Registrovano u ALiMS	
52.	Slip utega-gace za herniju duboke Sa otvorom i genitalnim gumenim uloscima . II III IV V VI VII VIII 78-80,80-86,86-92,92-99,99-106,106- 114, 114-122	S-648	kom	II-VIII	<i>Postaviti gumeni jastuce preko pupcane kile omotati pojasi oko stomaka i zategnuti kopcama</i>		
53.	Pojas za pupcanu kilu sa jast. 10cm. podesavajuci pojas sa jastucetom. I II III IV V VI VII VIII od 80 do 115 cm	S-683	kom	I-VIII	<i>Postaviti gumeni jastuce preko pupcane kile omotati pojasi oko stomaka i zategnuti kopcama</i>	Pupcana kila. Klasa I Registrovana u ALiMS	
54.	Pojas za femoralnu kilu Velicine: S M L O. struka: 84-100 94-110 110-128	B -50 B-51 B-52	kom		<i>Navuci nogavicu do sa otvorom do predela kuka. Zategnuti pojasi u predelu struka.</i>	Obezbedjuje neophodno podupiranje i zastitu. Klasa I Registrovano u ALIMS	

VRAT- KRAGNE																		
55.	<p>Tomas kragna meka 8 i 10 cm spuzvast materijal presvucen pamukom sa cicak trakom <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td> </tr> <tr> <td>28-34</td><td>34-40</td><td>40-46</td><td>od 46</td> </tr> <tr> <td>obim vrata</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> </p>	I	II	III	IV	28-34	34-40	40-46	od 46	obim vrata				S-861/862	kom	I-IV	<p><i>Postavite kragnu na vrat sleva na desno i spojite cicak trakom. Ne cedite, ne pegljajte perite blagim sredstvima</i></p>	<p>Preventivne i zastitne svrhe, kod blagih hronicnih ozleda vrata, povreda kicme, post-operativno nakon zahvata na vratnim prsljenovima Klasa I Registrovano u ALIMS</p>
I	II	III	IV															
28-34	34-40	40-46	od 46															
obim vrata																		
56.	<p>Tomas kragna tvrda -dvodelna Iz dva dela, plasticni fleksibilni material, podesiva po visini <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td> </tr> <tr> <td>28-34</td><td>34-40</td><td>40-46</td><td>od 46</td> </tr> </table> </p>	I	II	III	IV	28-34	34-40	40-46	od 46	S-860	kom	I-IV	<p><i>Podesite visinu kragne cicak trakom i postavite na vrat. Spojite krejeve cicak trakom</i></p>	<p>Koristi se u preventivne i zastitne svrhe kod blazih i hronicnih povreda vrata, cervicalne ortoze, povreda kicme, postoperativno nakon zahvata na vratnim prsljenovima. Klasa I Registrovano u ALIMS</p>				
I	II	III	IV															
28-34	34-40	40-46	od 46															
57.	<p>Ortoza za vrat (filadelfija) Velicine: cm <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>S,</td><td>M,</td><td>L,</td><td>XL</td> </tr> <tr> <td>5.46</td><td>8</td><td>10.54</td><td>13.08</td> </tr> </table> </p>	S,	M,	L,	XL	5.46	8	10.54	13.08	961	kom		<p><i>Kragna iz dva dela . Pozicionirajte prvo zadnji deo sa osloncem na ramena ,zatim prednji deo i fiksirajte cicak trakom. Pratite strelice utisnute na kragni</i></p>	<p>Koristi se u terapiji distorzije vratnih prsljenova, diskopatije, trauma, postoperativno nakon zahvata na vratnim prsljenovima za stabilizaciju i podrsku. Klasa I Registrovano u ALIMS</p>				
S,	M,	L,	XL															
5.46	8	10.54	13.08															
58.	<p>Ortoza za vrat eksteziona (po Rodzersu) Velicine: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>S</td><td>M</td><td>L</td> </tr> <tr> <td>35-39</td><td>39-43</td><td>43-47</td> </tr> </table> </p>	S	M	L	35-39	39-43	43-47	E 42P	kom		<p><i>Pre postavljanja kragne glava pacijenta mora biti u neutralnom položaju. Postavite prednji deo ortoze na vrat pacijetna tako da prislonite gornji deo uz bradu. Fiksirati zatvaranjem metalne kopce.</i></p>	<p>U terapiji kod akutnih i hronicnih vratnih sindroma, degerativnih promena, povreda kiceme, kao i post-operativno nakon zahvata na vratnim prsljenovima za stabilizaciju i podrsku Klasa I Registrovano u ALIMS</p>						
S	M	L																
35-39	39-43	43-47																
59.	<p>Ortoza za vrat sa podrskom za bradu Velicine: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>S</td><td>M</td><td>L</td> </tr> <tr> <td>25-32</td><td>33-39</td><td>40-46</td> </tr> </table> </p>	S	M	L	25-32	33-39	40-46	C 58	kom		<p><i>Prisloniti prednji deo ortoze na vrat pacijenta, zatim gornji deo prisloniti uz bradu i zlepiti cicak trakom ne vrseći veliki pritisak na vrat</i></p>	<p>Koristi se u preventivne i zastitne svrhe u terapiji kod akutnih i hronicnih vratnih sindroma, degerativnih promena, povreda kicme, kao i post-opertivno nakon zahvata na vratnim prsljenovima za stabilizaciju i podrsku Klasa I Registrovano u ALIMS</p>						
S	M	L																
25-32	33-39	40-46																

	KUK, KOLENO																		
60.	<p>Ortoza za kuk</p> <p>Velicine: obim struka obim butine</p> <table> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">XL</td> </tr> <tr> <td>struk: 60-90</td> <td>82-110</td> <td>104-135</td> </tr> <tr> <td>butina: 40-47</td> <td>45-53</td> <td>51-60</td> </tr> </table>	S	L	XL	struk: 60-90	82-110	104-135	butina: 40-47	45-53	51-60	NEW ORTOPRIM 3 HIP	kom		<p><i>Ovu ortozu postavlja kvalifikovano lice pozinirajuci deo oko struka i butine.</i></p>	<p>Koristi se kod operacije kuka, kod neoperabilnih preloma, luksacije kuka, osteoporoze. Kontrola pokreta fleksije, enstenzije i abdukcije u kuku</p> <p>Klasa I Registrirano u ALIMS</p>				
S	L	XL																	
struk: 60-90	82-110	104-135																	
butina: 40-47	45-53	51-60																	
	KOLENO																		
61.	<p>Ortoza za koleno</p> <p>Velicine: obim kolena visina/duzina</p> <table> <tr> <td style="text-align: center;">S</td> <td style="text-align: center;">M</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">XL</td> </tr> <tr> <td>34-42</td> <td>35-44</td> <td>37-46</td> <td>39-48</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>70</td> </tr> </table>	S	M	L	XL	34-42	35-44	37-46	39-48	35	50	60	70	8620	kom		<p><i>Ova ortoza lako se postavlja. Prvo se pozicionira tako da otvor bude na pateli a fiksacija se vrsti pomocu cicak traka</i></p>	<p>Koristi se kod svih postoperativnih i posttraumatskih stanja kod kojih je potrebna privremena imobilizacija kolena.</p> <p>Klasa I Registrirano u ALIMS</p>	
S	M	L	XL																
34-42	35-44	37-46	39-48																
35	50	60	70																
62.		8627	kom																



63.	<p>Ortoza za koleno</p> <p>Velicine: obim kolena visina/duzina</p> <table border="1" data-bbox="1818 360 551 442"> <tr> <th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th></tr> <tr> <td>34-42</td><td>35-44</td><td>37-46</td><td>39-48</td></tr> <tr> <td>35</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td></tr> </table>	S	M	L	XL	34-42	35-44	37-46	39-48	35	50	60	70	<p>951</p> <p>kom</p> <p><i>Ova ortoza lako se postavlja. Prvo se pozicionira tako da otvor bude na pateli a fiksacija se vrši pomoću cicak traka</i></p> <p>Koristi se kod svih postoperativnih i posttraumatskih stanja kod kojih je potrebna privremena imobilizacija kolena.</p> <p>Klasa I</p> <p>Registrirano u ALIMS</p>	
S	M	L	XL												
34-42	35-44	37-46	39-48												
35	50	60	70												
64.		<p>Ortoza za koleno CROM</p> <p>Velicine : univerzalna</p>	<p>CROMS 4L</p> <p>Kom</p> <p>CROMS 4N</p> <p>kom</p> <p><i>Centralni deo ortoze u predelu regulacije postavlja se na sredini deo bocno od patele. Gornje i donje delove ortoze podešavati cicak trakama ne vrseci veliki pritisak na nogu.</i></p> <p>U prevenciji distorzije patele, kao neoperabilne artroze kolena, latero-medijalne nestabilnosti kolena i u post-operativne svrhe, povreda kalateralnih ligamenata i meniskusa.</p> <p>Klasa I</p> <p>Registrirano u ALIMS</p>												
65.		<p>Ortoza za stabilizaciju kolena sa metalnom sinom i zglobom 30cm</p> <p>elasticna ortoza sa otvorom na casici sa metalnim sipkama i kolenim zglobom</p> <table border="1" data-bbox="1818 1274 551 1356"> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> <tr> <td>30-34</td> <td>34-38</td> <td>38-42</td> <td>42-46</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	30-34	34-38	38-42	42-46	<p>S-844</p> <p>kom</p> <p>I-IV</p> <p>Za sve ortoze kolena <i>Postavite vasu ortozu tako da otvor za patelu (casicu) obavije casicu kolena. Zategnite cicak trakom ortoze Zglob metalne potpore mora biti u predelu sredine casice sa obe strane kolena</i></p> <p>Obezbedjuje potreban nivo kompresije, poboljsava cirkulaciju, smanjuje otok i bol uz parcijalnu imobilizaciju, ogranicava pokrete. -latero-medijalna nestabilnost kolena.</p> <p>Klasa I</p> <p>Registrirano u ALIMS</p>				
I	II	III	IV												
30-34	34-38	38-42	42-46												

67.	<p>Ortoza za koleno sa ROM kontrolorom</p> <p>Velicine: S M L XL 29-34 34-39 38-44 42-49</p>	TL 13	kom	<p><i>Ovu ortozu namesta samo strucno lice -lekar specijalista. Ortoza se postavlja sa otvorom na pateli, fiksira se cicak trakama a rom kontrolor sa korektorima se podesava do kojeg stepena se ispravlja ili savija koleno</i></p>	<p>Prevenciji distorzije patele, kod neoperabilne artroze kolena, latero-medijalne nestabilnosti kolena i u postoperativne svrhe. ROM kontrolor omogucva podesavanje fleksije i ekstenzije do neutralne pozicije Klasa I Registrovano u ALIMS</p>	
68.	<p>Ortoza za koleno sa ROM kontrolorom</p> <p>Velicine: S M L XL 29-34 34-39 38-44 42-49</p>	TL 16	kom	<p><i>Ovu ortozu namesta samo strucno lice -lekar specijalista. Ortoza se postavlja sa otvorom na pateli, fiksira se cicak trakama a rom kontrolor sa korektorima se podesava do kojeg stepena se ispravlja ili savija koleno</i></p>	<p>Koristi se u prevenciji distorzije patele, kod neoperabilne artroze kolena, latero-medijalne nestabilnosti kolena i u postoperativne svrhe. ROM kontrolor omogucva podesavanje fleksije i ekstenzije do neutralne pozicije Klasa I Registrovano u ALIMS</p>	
69.	<p>Ortoza za stabilizaciju kolena sa metalnom sinom i zglobom 40 cm</p> <p>I II III IV 30-34 34-38 38-42 42-46</p>	S-846	kom	<p><i>Postavite vasu ortozu tako da otvor za patelu (casicu) obavije casicu kolena. Zategnite cicak trakom ortozu Zglob metalne potpore mora biti u predelu sredine casice obe strane kolena</i></p>	<p>Latero-medijalna nestabilnost kolena Velicine isto kao re.br. 48</p>	

CE

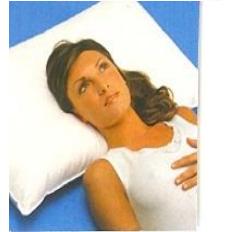
70.	Ortoza elast. za kol.sa otvorom za patelu Elasticna ortoza sa otvorom za patelu i ojacanjima od silikona za bocno podupiranje. I II III IV 30-34 34-38 38-42 42-46	S-887	kom	I-IV	<i>Ova ortoza se navlaci do predela kolena tako da otvor za patelu daje potporu pateli, silikonske udlage podupiru koleno sa obe strane.</i>	Nestabilnost patele, latero-medijalna nestabilnost kolena, patologija kolena kod pacijenata starije zivotne dobi. Prevencija luksacije patele, u preventivne i postoperativne svrhe. Klasa I Registrovano u ALiMS
71.	Ortoza elast. za koleno sa otvorom za patelu ojacana kaisevima. I II III IV 30-34 34-38 38-42 42-46	S-884	kom	I-IV	<i>Navucite ortozu na nogu do predela iznad kolena da otvor na ortozi bude u predelu casice kolena i zategnjite dodatnim kaisevima na cicak</i>	Obezbedjuje potrebnu fleksibilnost , obezbedjuje potreban nivo kompresije, ogranicava misicne kontrakcije, smanjuje otok i bol, -nestabilnost patele, prevencije luksacije patele, kod sportskih aktivnosti.
72.	Ortoza elast.za kol. sa otvorom pat. Isto kao S-884 samo bez kaiseva	S-885	kom	I-IV		Nestabilnost patele, kod sportskih aktivnosti.
73.	Ortoza za koleno sa silikonskim podupiracima <i>Velicine: I II III IV 11-16 16-18 18-20 20-22</i>	S-519	kom	I-VI	<i>Navucite ortozu na nogu do predela iznad kolena da otvor na ortozi bude u predelu casice kolena . Dve udlage podupiru koleno sa obe strane</i>	Nestabilnost patele ,artoza,kontuzije
74.	Steznjak za koleno I II III IV V 30-34 34-38 38-42 42-46 46-50 Steznjak za koleno vuna	S-517	kom	I-V	<i>Steznjak za koleno od pamuka ili vune navlaci se do kolena kao carapa</i>	Nakon laksih distorzija kolateralnih ligamenata, kontuzije, artroza. preventivne i terapeutske svrhe prilikom naprezanja, istezanja. Klasa I Registrovano u ALiMS



75.	Traka za koleno sa slikonom I II III IV 30-34 34-38 38-42 42-46 obim kolena	S-886	kom	I-IV	Zatezanje sa kopcom i cicak trakom u predelu casice kolena	Traka za patelu- tendinitis, tendinopatije Klasa I	
76.	Ortoza za skocni zglob WALKER FIXED, ROM	WALKER FIXED	kom		Ortozu postavlja kvalifikovano strucno lice. Ortoza se zateze cicak trakama a kontrolor se pozicionira prema potrebi pacijenta.	Preporucuje se kod rupture Ahilove teticke, frakture maleolusa, posle operativnog zahvata. Obezbeđuje dobru imobilizaciju izmedju stopala i skocnog zgloba pod odgovarajućim uglom. Laka za podešavanje i kretanje.	
77.	Velicine: S M L 34-38 38-42 43-45	WALKER ROM	kom				
	SKOCNI ZGLOB						
78.	Ort. za skocni sa pumpicom BIVALVA jaka plastичna ortoza sa pumpicom za naduvavanje unutrasnje strane ortoze. Univerzalna za levu i desnu nogu	S-888	kom	univerzalna	Postavite tabanski deo ortoze u predelu pocetka pete. Sa obe strane postavite plasticnu potporu u predelu zgloba. Zategnite obe plasticne dela cicak trakama. Pumpicom koja se nalazi u pakovanju naduvati obe strane ortoze	Za imobilizaciju skocnog zgloba, distorzija skocnog zgloba, prevencija distorzije skocnog zgloba, nakon hirurških intervencija u rehabilitaciji. Klasa I	
79.	Ortoza potkolena plasticna /peroneus/ Velicine: S M L XL	NA 400	kom		Ova ortoza vrsi imobilizaciju skocnog zgloba u neutralni položaj u slučaju padajućeg stopala. Lako se namesta . Stopalo se postavi na ortozu i zategne se cicak trakama i zajedno sa ortozom obuće se cipela.	Kod terapije flakcidnog stopala, svih vrsta pareza i paralize n.peroneus-a i n-tibialis-a Klasa I Registrirano u ALIMS	

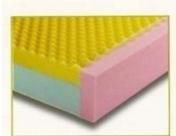
80.	<p>Ortoza potkolena plasticna /peroneus/</p> <p>Podesava se prema korisniku</p> <p>Velicine: S, M, L, XL, XXL</p>	D82	kom		<p><i>Ova ortoza vrsi imobilizaciju skocnog zgloba u neutralni položaj u slučaju padajućeg stopala. Lako se namesta . Stopalo se postavi na ortozu i zategne se cicak trakama i obije cipela. Ukoliko je potrebna dorada ortoza se greje grejnim fenom i modelira po nozi korisnika.</i></p>	<p>Kod terapije flakcidnog stopala, svih vrsta pareza i paralize n.peroneus-a i n-tibialis-a</p> <p>Klasa I</p> <p>Registrirano u ALIMS</p>												
81.	<p>Ort. za skocni zglob ojacana kaisevima i potporom od silikona</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td> </tr> <tr> <td>16-21</td><td>21-26</td><td>26-31</td><td>31-37</td> </tr> <tr> <td colspan="4">obim skocnog zgloba</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	16-21	21-26	26-31	31-37	obim skocnog zgloba				S-538	kom	I-IV	<p><i>Navlaci se kao carapa sa otvorom na peti, fiksira se dodatnim zatezanjem sa cicak trakom</i></p>	<p>Preventivne i terapeutske svrhe prilikom naprezanja, uganuca, iscasenja, lokalnih bolova, oticanja izazvanih povredama.</p> <ul style="list-style-type: none"> -frakture maleola i skocnog zgloba -tendinopatie peroneusa Klasa I
I	II	III	IV															
16-21	21-26	26-31	31-37															
obim skocnog zgloba																		
82.	<p>Ort.za skocni zglob sa kaisev. elasticna carapa-steznjak sa dodatnim zatezanjem</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td> </tr> <tr> <td>16-20</td><td>20-24</td><td>24-29</td><td>29-33</td><td>33-37</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	V	16-20	20-24	24-29	29-33	33-37	S-560	kom	I-V	<p><i>Navlaci se kao carapa sa otvorom na peti, fiksira se dodatnim zatezanjem sa cicak trakom</i></p>	<p>Nestabilnost zgloba, fiksacija nakon operacija, trauma, distorzije, artroza, tendinitis</p> <p>Klasa I</p>		
I	II	III	IV	V														
16-20	20-24	24-29	29-33	33-37														
83.	<p>Ortoza –steznjak elasticni za skocni zglob</p> <p>blago rastegljiv,</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td> </tr> <tr> <td>18-21</td><td>21-24</td><td>24-27</td><td>27-30</td><td>30-33</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	V	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33	S-537	kom	I-V	<p><i>Navlaci se kao carapa</i></p>	<p>U preventivne i terapeutske svrhe prilikom naprezanja, uganuca, iscasenja, lokalnih bolova, oticanja izazvanih povredama ili kao preventive. Klasa I</p>		
I	II	III	IV	V														
18-21	21-24	24-27	27-30	30-33														
84.	<p>Ortoza za skoc.zglob ukrstajuća</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>I</td><td>II</td><td>III</td><td>IV</td><td>V</td> </tr> <tr> <td>18-21</td><td>21-24</td><td>24-27</td><td>27-30</td><td>30-33</td> </tr> </table>	I	II	III	IV	V	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33	S-534	kom	I-V	<p><i>Navlaci se kao carapa</i></p>	<p>Uganuca, iscasenja, oticanja</p>		
I	II	III	IV	V														
18-21	21-24	24-27	27-30	30-33														
85.	Ortoza za skocni ojacana- plava	S-882	kom	I-IV		U preventivne i terapeutske svrhe												

86.	Podloga za dusek PVC 120x220	S-872	kom	univerzalna	<i>Postavlja se direktno na dusek</i>	Za zastitu duseka kod lezecih bolesnika
87.	Nastavak za WC solju 11 cm tvrdi	AS-501	kom	univerzalna	<i>Postavite nastavak na wc solju i fiksirajte ga podesavanjem dodatnim plasticnim osiguracima. Postupak na pakovanju</i>	Povisica za WC solju za osobe nakon operacije kuka. Klasa I ne podleze registraciji
88.	Jastuk cervicalni anato.memori pena anatomski, ne pogoduje bioloskim agencima(grinje, bakterije, gljivice) u njega ne moze prodreti prasina pa je i antialergijski . Dimenzije 40x70 cm	S-931	kom	40x70 cm	<i>Jastuk je formiran i spreman za upotrebu</i>	Smanjuje bolnost vrata, nesanicu, pruza prirodan položaj vrata i glave, kao preventiva kod dehidracije usne supljine, pharynigitisa, laryngitisa . Klasa I
89.	Jastuk cerv.anatomski anti rusu	S-933	kom	48x78 cm		Protiv hrkanja Klasa I
PEDIJATRIJA						
	Ortoza za iscasene kukove beba (Pavlikovi remeni) Obim grudnog kosa: XS S M L 23-33 33-40 40-50 50-60	115	kom		<i>Prvo pozicioniranje Pavlikovog aparata postavlja kvalifikovano lice. Pozicija se regulise kopčama na kaisevima.</i>	Kod dece sa sublukacijom i urodjenim iscasenjem kukova, kod displazije kuka. Upotreba aparata do 9. meseci života. Klasa I Registrovano u ALIMS
90.	Ortoza kuka za bebe DENNIS BROWN SPLINT Velicine: rastojanje izmedju kolena u razmaknutom položaju nogu. S M L 18-23 24-29 30-40	C29	kom		<i>Prvo pozicioniranje Denis Brow aparata postavlja kvalifikovano lice. Pozicija kukova se regulise kopčama na metalnoj sipci.</i>	Kod dece sa subluksacijom i urodjenim iscasenjima kukova, kod displazije kuka.



91.	<p>Ortoza kuka za bebe, abdukcionalna FREJKA SPLINT</p> <p>Velicine: Razmak izmedju kolena u razmakanutim položaju</p> <table border="0"> <tr> <td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>XL</td></tr> <tr> <td>15-18</td><td>18-20</td><td>20-25</td><td>25-28</td></tr> </table>	S	M	L	XL	15-18	18-20	20-25	25-28	117	kom		<p><i>Prvo pozicioniranje ove ortoze postavlja strucno kvalifikovano lice.</i></p>	<p>Kod dece sa urođenim iščasenjima kukova, sa subluxacijom, ili displazijom kuka. Pediatric abduction splint</p>		
S	M	L	XL													
15-18	18-20	20-25	25-28													
92.	<p>Ortoza kuka za bebe abdukcionalna ATLANTA APARAT</p> <p>Velicine po obimu struka:</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>35-40</td> <td>41-45</td> <td>46-50</td> <td>51-55</td> </tr> </table>	1	2	3	4	35-40	41-45	46-50	51-55	C30	kom		<p><i>Prvo pozicioniranje ove ortoze postavlja strucno kvalifikovano lice.</i></p>	<p>Koristi se displazije kuka. Rezidualne displazije kuka posle konzervativne redukcije dislokacije. Razvojni poremećaj kuka odojceta od 6. do 18. Meseci.</p>		
1	2	3	4													
35-40	41-45	46-50	51-55													
93.	<p>Aparat- ortoza za korekciju stopala DENNIS BROWN</p> <p>Velicine: rastojanje izmedju centralnih tacaka cipela</p> <table border="0"> <tr> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> </tr> <tr> <td>5-15</td> <td>15-25</td> <td>25-35</td> </tr> </table>	S	M	L	5-15	15-25	25-35	D47	D49		<p><i>Prvo pozicioniranje ove ortoze postavlja strucno kvalifikovano lice prilikom izrade cipela po meri.</i></p>	<p>Za korekciju tibijalne rotacije stopala, lezija perifernog i centralnog neuroma sa platformom i adaptacijom za cipele. Uključuje dve sipke kracu i duzu.</p>				
S	M	L														
5-15	15-25	25-35														
94.	<p>Ortoza za koleno i skocni zglob, pedijatrijska</p> <p>Velicine: A- duzina potkolenog dela od pete kada je noga savijena pod uglom od 90</p> <p>B- obim butane</p> <p>C- obim lista</p> <table border="0"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>S 7.5-12.5</td> <td>15-21</td> <td>11-15</td> </tr> <tr> <td>L 9-15.5</td> <td>21-27</td> <td>15-20</td> </tr> </table>	A	B	C	S 7.5-12.5	15-21	11-15	L 9-15.5	21-27	15-20	CLUBAX			<p><i>Prvo pozicioniranje ove ortoze postavlja strucno kvalifikovano lice.</i></p>	<p>Za korekciju krivog stopala i tibijalne rotacije, sa visestrukom regulacijom položaja</p>	
A	B	C														
S 7.5-12.5	15-21	11-15														
L 9-15.5	21-27	15-20														
95.	<p>Korekcioni varus valecs aparat</p> <p>Velicine po duzini stopala deteta od pete do vrha velikog prsta u cm</p> <p>7.5 do 10</p> <p>10.5 do 13.5</p>	BEBAX			<p><i>Prvo pozicioniranje ove ortoze postavlja strucno kvalifikovano lice.</i></p>	<p>Za preciznu kontrolu i lecenje urođenih deformacija stopala kod dece: pes equinovarus, pes matatarus, talus valgus, pes calacaneus.</p>										

Antidekubit program

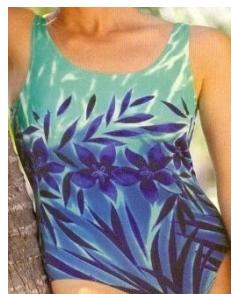
96.	Antidekubilani dusek sa kompresorom FLU PAD /za osobe do 80 kg/	FDP	kom	1800x800x50	<i>Postavite dusek na madrac, spojite plasticna creva sa kompresorom i podesite pritisak prema tezini pacijenta na kompresor. Naduvajte vas dusek prekrjite ga carsavom i smestite lezeceg bolesnika .</i>	  	FDP	AS 16L do150 kg	PRO 1 PLUS preko 150 kg
97.	Antid.dusek bez kompresora valjkast	AS 16L	kom	1800x800x95					
98.	Ant.dusek PRO 1 PLUS bez kompres.	AS P1P	kom	1900x850x100					
99.	Kompresor za antidekub.dusek	AS1	kom						
100.	Antid.dusek poliuretan 1/3 dela za bolesnicke krevete	MP 14	kpl	1900x850x140	<i>Postavite sva tri dela duseka na konstrukciju bolesnickog kreveta i formirajte dusek.Prekrjite dusek carsafon najprakticniji je carsafon sa gumom za zatezanje prekrjite deo duseka sa PVC podmetacem kao zastita od mokrenja pacijenta.</i>	 	POLIURETAN		
101.	Antid.dusek trod.memori sa navlakom nepromocivom - za bolesnicke krevete - memori pena-trodelni specijalna nepromociva navlaka	VECO2	kpl	1900x850x140	<i>Postavite sva tri dela duseka na konstrukciju bolesnickog kreveta i navucite zastitnu navlaku.</i>	 	MEMORI		
102.	Antid. jastuk za invalid.kolica polimat	CVECF	kom	430x430x50	<i>Postavlja se na sedisni deo invalidskih kolica. Na samom jastuku obelezena je gornja ili donja strana jastuka strelicom.</i>				
103.	Antid.jastuk za inv.kolica memori	VECO1	kom	420x420x50	<i>Postavlja se na sedisni deo invalidskih kolica</i>				
104.	Antid. jastuk za inv.kolica silikon	P 250	kom	420x420x50	<i>Postavlja se na sedisni deo invalidskih kolica</i>	 	SILIKONSKI		
105.	Antid. jas. za inv.kolica silik.sa rupom	P250LZF	kom	420x420x50	<i>Postavlja se na sedisni deo invalidskih kolica</i>				

	P E R I K E					
106.	<i>Perika Yuka</i>		kom			
107.	<i>Perika Xsara</i>		kom			
108.	<i>Perike: Viola, Ares</i>		kom			
109.	<i>Perie: Dike,Kirka,Valeri, Kapa,Pan (m)</i>		kom			
110.	<i>Perika Agila</i>		kom			
111.	<i>Perika Briza,Aster</i>		kom			
112.	<i>Perika Nexia MP</i>		kom			
113.	<i>Perika Vesta Mono</i>		kom			
114.	<i>Perika Rava</i>		kom			
115.	<i>Perie:a Tigra</i>		kom			
116.	<i>Perike: Medeja, Ariadna,Hera</i>		kom			
117.	<i>Perika Zea</i>		kom			
118.	<i>Perika Erika</i>		kom			
119.	<i>Perika Avena</i>		kom			
120.	<i>Perika Serena</i>		kom			
121.	<i>Perika Brava</i>		kom			
122.	<i>Perika M-Had</i>		kom			
123.	<i>Perika Libra</i>		kom			
124.	<i>Perika Danaja</i>		kom			
125.	<i>Perika Diana</i>		kom			
126.	<i>Turban marama -Doubly</i>		kom			
127.	<i>Turban marama -Roxy</i>		kom			
128.	<i>Turban Tendy</i>		kom			

Podesive po obimu glave sa elasticnom trakom u zadnjem delu u predelu vrata i kopcom. Uzmite periku obema rukama malo se savijete ka napred i postavite periku kao kad stavljate kapu na glavu. Kopcama otpozadi zategnite. Perike prati blagim decijim samponom. Nakon pranja samo je rastresite i postavite na neko postolje da se osusi. Korisiti blage decije sampone.

Amoena- Nemacka

- vestacke silikonske dojke, specijalni gudnjaci i kupaci kostimi

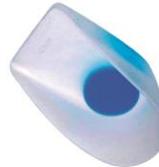
129.	Vestacka silikonska dojka - oblici: trouglasti ovalni i asimetrican	triangle teardrop asimetrik	kom	0 - 12		<i>Nose se u specijalnom grudnjaku sa dzepom</i>	 	 	 
130.	Vestacka silikonska dojka lagana	TRIA LIGHT	kom	1-17		<i>Silikonsku dojku smestiti u otvor na grudnjaku</i>			
131.	Vestacka silikonska dojka samplepljiva	TRIA CONTACT	kom	0-10					
132.	Ortop. grudnj. Jad	levo/desno	kom	70-90		<i>Cuvati od uboda ostrih predmeta</i>			
133.	Ortop. grudnj. Amoena	levo/desno	kom	70-95					
134.	Ortop. grudnj. Claire	levo/desno	kom	70-90					
135.	Ortop.grudnj. Iris	levo/desno	kom	70-110					
136.	Ortop.grudnj. Bela	obostrani	kom	70-100					
137.	Ortop.grudnj. Rita	obostrani	kom	75-110					
138.	Ortop.grudnj. Carmen	levo/desni	kom						
139.	Ortop.grudnj. Ariane	bez dzep. bez.dzep.	kom	75-100 80-110		<i>Potrebno je odrediti tacnu velicinu TABELA U PRILOGU</i>			
140.	Ortop.grudnj. Ametist	obostrani	kom	75-95					
141.	Ortop.grudnj. Natali	levo/desni	kom	80-100					
142.	Ortop.grudnj. Nora	obostrani	kom	70-95					
143.	Ortop.grudnj. Mona	obostrani	kom						
144.	Ortop.grudnj. Beverli	obostrani	kom						
145.	Ortop.grudnj. Perfomanse	obostrani	kom						
146.	Ortop.grudnj. Power B	obostrani	kom						
147.	Ortop.grudnj. Clara SB	obostrani	kom						
148.	Ort.kupaci kostim amoena	stalna rasprodaja	kom	38-56		<i>Kupaci kostimi konfekcijske velicine</i>			
149.	Kupaci modeli 2008		kom	38-56					
150.	Ort.kupaci kostim modeli 2009 godine		kom	38-56					

	HODALICE, STAPOVI, KOLICA, STOLICE, STAKE					
151.	STALAK za hodanje sa 4 tacke oslonca sklopiva	TRM 16	kom		<i>Hodalica se isporučuje sklopljena. Lako za otvaranje pritiskom na sklopku. Cetri tacke oslonca moguce podesiti po visini.</i>	Sklopiva hodalica se preporučuje za korišćenje osobama koje imaju ozbiljne probleme u stabilnosti pri kretanju kao i za oporavak kretanja. Hodalica se mora koristiti po preporuci lekara ili terapeuta a u zavisnosti od stanja korisnika. Klasa I
152.	ŠTAKE pospazusne aluminijumske Size S M L	TRM 04	par		<i>Za podesavanje visinu oslonca za ruku ili visinu staka koja mora naci oslonac ispod pazuha koriste se zavrtnji.</i>	Preporucuje se kod osoba koje imaju poteskoca sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u duzini nogu. Klasa I
153.	ŠTAKE podlakatne aluminijumske	TRM 05	kom	na podesavanje visine	<i>Podesavanje visine prema korisniku</i>	Preporucuje se kod osoba koje imaju poteskoca sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u duzini nogu. Klasa I
154	ORTOPEDSKI stap aluminijumski na produžetak	TRM	kom	na podesavanje visine	<i>Podesavanje visine</i>	Preporucuje se kod osoba koje imaju poteskoca sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u duzini nogu.
155.	STAP aluminijumski sa tri ili cetri tacke oslonca	TRM 02	kom	na podesavanje visine	<i>Podesavanje visine</i>	Preporucuje se kod osoba koje imaju poteskoca sa stabilnosti pri hodu, postoperativno ili ako je u pitanju nejednakost u duzini nogu Klasa I



156.	Nastavak za WC solju 11 cm tvrdi	AS-501	kom	univerzalna		<i>Postavite nastavak na wc solju i fiksirajte ga podesavanjem dodatnim plasticnim osiguracima. Postupak na pakovanju</i>	Povisica za WC solju za osobe nakon operacije kuka. Klasa I ne podleze registraciji	
157.	TOALETNA KOLICA	TRM 87	kom				<i>Sa plasticnim sedistem prekrivena tankim tapaciranim poklopcom za sedenje , mali tockovi sa kocnicama na tockovima, posuda se klizno izvlaci sa poklopcom</i>	
158.	INVALIDSKA MEHANICKA KOLICA STANDARDNA	TRM 07					Invalidska kolica na rucni pogon za samostalnu upotrebu , za osobe potpuno zavisne od drugog lica. Dva velika tocka sa kocnicama i dva prednja mala. Gaziste je od aluminijuma.	
159.	TOALETNA STOLICA	TRM 77						
160.	Stolica za kadu	OS1036						
161.	SILIKONSKI ULOZAK ZA CELO STOPALO	TOMI 801/3	par					

162.	SILIKONSKA PETA	TOMI 801/4	par			
------	------------------------	-----------------------	-----	--	--	--



IMACO d.o.o. uvoznik i zastupnik : Amoena Nemacka, Europas Italija, Termoleto Italija, T.L.M. Italija i Viktorija Slovenija, PRIM Spanija, TRIJAMED Rumunija i ELLEN WILLE Nemacka

Medicinska sredstva iz naseg uvoznog programa registrovana su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, osim programa perike koje ne podlezu registraciji.

Azurirano
U Beogradu: 03.03.2014

IMACO d.o.o. Novi Beograd
Direktor
Dragica Vasic

Amoena merni sistem

Za pravilno utvrđivanje veličine grudne proteze pronađite veličinu svog grudnjaka po spoljnoj grudnoj meri i veličinu korpe u suprotni tabeli. Kada pronađete veličinu svog grudnjaka i korpe u doljoj tabeli lako ćete pronaći veličinu grudne proteze.

Ortopedski grudnjaci



Korpa	Veličina grudnjaka											
AA	60	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
A	65	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105
D					65	70	75	80	85	90	95	100
E						65	70	75	80	85	90	95
F							65	70	75	80	85	90

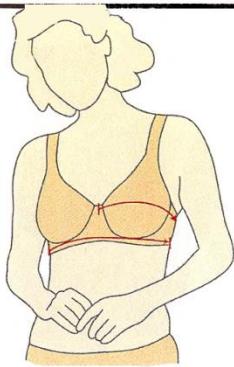
Grudne proteze	Art.	Vrećica	Veličina																
Tresia Personally	663	116		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Classic Flow	359	116	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Tria Flow	369	116	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Classic Light, II	354/355	116	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Classic Light Climate Control	358	058	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Tria Light, II	366/362	116	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Tria Aire	442			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Classic Contact	351	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Tria Contact	361	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Tresia Contact	653	-		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Classic Standard	355	116	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Discrene Asymmetric	9640	309			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Discrene Triangle	9560	306	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Priform	206	-	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10					

Grudne proteze	Art.	Debljina	Veličina									
Balance Extra Soft	259	-	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Balance Delta	271	-			S		M	L	XL	XXL		
Balance Part donji deo	275	A, B			S		M	L				
Balance Part Contact donji deo	276	A, B			S		M	L				
Balance Part gornji deo	277	A, B			S		M	L				
Balance Part Contact gornji deo	278	A, B			S		M	L				

Uputstvo za merenje

Morate uzeti **samo** dve jednostavne mere, da odredite pravilnu veličinu grudnjaka koji vam treba.

- Donja mera:**
izmerite ukupan obim grudnog koša neposredno ispod dojki.
- Delimična gornja mera:**
izmerite neoperisanu stranu, od sredine grudi, preko vrha dojke do sredine leđa.



Za utvrdjivanje odgovarajuće mere vašeg grudnjaka sledite uputstva.

- 1.) Donja mera, izmerena u cm, određuje vam veličinu grudnjaka.
- 2.) Delimična gornja mera, izmerena u cm i pomnožena sa 2, određuje vam veličinu korpe.
- 3.) Tačnu veličinu grudnjaka potražite pomoću tabele.

Važno:

Pazite kako se merite. Npr.kada uzimate gornju meru, ruke vam moraju biti spuštene, inače može doći do greške u merenju.

Donja mera u cm med:

	63-67	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------

Veličina grudnjaka

	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
--	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Gornja grudna mera u cm za veličinu korpe

AA	75-77	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127
A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129
B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131
C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133
D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135
E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137
F	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129	132-134	137-139

VELIČINE	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
ŽENSKI PROGRAM								
Steznici, brushalteri i korseti								
Veličina	40-42	42-44	44-46	46-48	48-50	50-52	52-54	54-56
Obim struka cm	63-68	68-74	74-81	81-88	88-96	96-104	104-113	113-122
Obim kukova cm	80-85	85-90	90-96	96-102	102-109	109-116	116-124	124-132
Velicina korpi B cm	82-85	86-89	90-94	95-99	100-104	105-110	111-116	117-124
Veličina korpi C cm	86-89	90-94	95-99	100-104	105-110	111-116	117-123	124-130
Brushaletri za dojenje								
Obim cm	84-87	88-91	92-96	97-101	102-106	107-112	113-118	119-124
Elasticne čarape								
Veličina	40-42	42-44	44-46	46-48	► 48			
Dužina stopala cm	8-8½	8½-9	9-9½	9½-10	► 10			
Broj cipele	35-36	36-37	37-38	38-40	► 40			
MUŠKI PROGRAM								
Gaće								
Obim struka cm	70-75	75-80	80-86	86-92	92-99	99-106	106-114	114-122
Hernija pojas S-646- 614, -648								
Obim kukova cm	75-90	80-96	85-103	90-109	95-116	100-122	105-129	110-135
Hernija pojas S-680-681-682								
Obim kukova cm	70-90	80-98	85-106	90-114	95-122	100-130		
MUŠKI I ŽENSKI PROGRAM								
Elastični pojasevi klasični								
Obim kukova cm	55-75	65-85	75-95	85-110	95-125	105-140	115-150	
Elastični pojasevi podešavajući S-151-152-154								
Obim kukova cm	58-70	65-78	72-86	80-95	87-105	94-113	101-121	108-130
Elastični pojasevi podešavajući ostali								
Obim kukova cm	60-75	70-90	87-109	100-126	110-140	120-150	128-160	135-170

OVA TABELA ODREĐUJE VELIČINE PROGRAMA EUROPAS- Italija / Scudotex - Scudovaris